

CE
0086

SPASY™

Kit de Vertebroplastia

Indicações


- VCF (Fratura por Compressão Vertebral) Causada por Osteoporose
- Fratura Osteolítica
- Fraturas Ósseas Metastáticas




NEW SURGICAL
compromisso com a saúde e a vida



Etapa-1

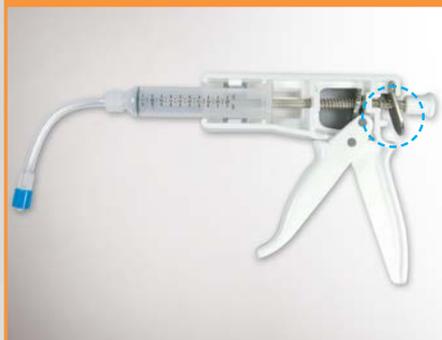

Empurre o empurrador e retire o carregador para fixar o pistão no meio do corpo.

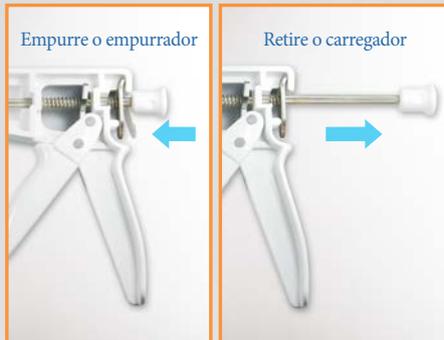

Etapa-2



Despeje o cimento cuidadosamente para dentro da seringa inclinando-a para o lado esquerdo, tal como apresentado na figura acima.

Etapa-3



Vire a seringa para a direita até que o "som click" seja audível. Em seguida, puxe o gatilho para remover o ar no interior da seringa.

Etapa-4



Conecte o Tubo de Ligação com a Agulha de Medula Óssea. Puxe o gatilho lentamente para pressionar o êmbolo da seringa e dessa forma inserir o cimento ósseo no corpo vertebral.

Informação do Produto

Código	Descrição	Qtd.
SWDG-4A	Introdutor de Cimento Ósseo	1 Unid
SWVP-11A	Agulha de Medula Óssea (Calibre 11)	2 Unid
SWVP-13A	Agulha de Medula Óssea (Calibre 13)	2 Unid

* Obs: Introdutor de Cimento Ósseo e Agulha de Medula Óssea vêm no kit SWM-KIT-T4

Código	Calibre	Comprimento
SWVP-11A	11	125mm
SWVP-13A	13	125mm

SPASY Agulha de Biópsia Óssea (Opcional)

Código	Descrição	Qtd.
BE KIT-A	Cânula e Empurrador	1 Unid

Fabricado Por:



Seawon Meditech Co., Ltd.
33, Bucheon-ro 298 beon-gil,
Wonmi-gi, Bucheon-si, Gyeonggi-do,
Zip Code 420-803, Coreia do Sul
Tel: +82 32 684 7071~4
www.seawonmt.com



Distribuído por:

New Surgical Implantes e Materiais Cirúrgicos LTDA.
CNPJ 27.462.568/0001-80
Rua Antônio Ataíde, 823 Ed. Tropical Shopping, Sala 403 -
Centro Vila Velha, ES, 29100-906
Tel (27) 30772772
vendas@newsurgicalopme.com.br
www.newsurgicalopme.com.br